


劑量旋鈕色號的圖例：

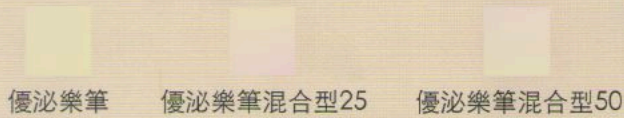

Lilly


台灣禮來股份有限公司
台北市復興北路365號11樓
電話：(02)2715-2950



全新 優泌樂筆® 使用說明

準備


請先備妥針頭、酒精棉球及優泌樂筆

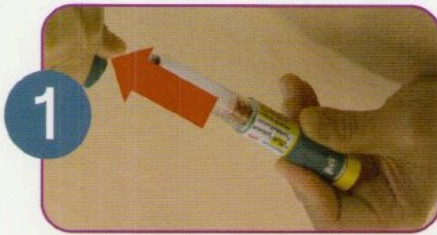

1

直接抽出並取下筆蓋。


檢查胰島素的標籤，確認您注射正確的胰島素類型、有效日期及外觀。

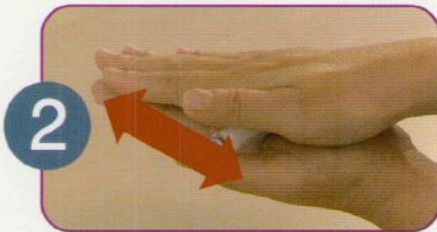

2

若您使用的是優泌樂筆混合型25 (Humalog Mix25 KwikPen) 或優泌樂筆混合型50 (Humalog Mix50 KwikPen)時：

請小力滾動優泌樂筆10次，再上下擺動10次，直到胰島素呈均勻霧狀。

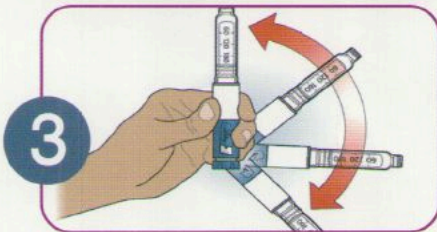


3



4

撕開針頭外蓋紙片。

以酒精棉球擦拭筆式小管卡匣套底端的橡皮塞。

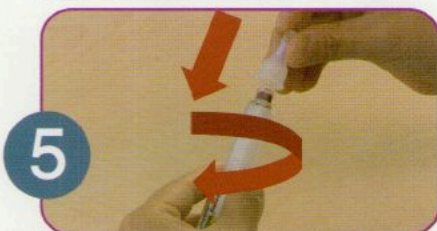

5

將附蓋的針頭垂直對準優泌樂筆後推上。

旋緊針頭。

Humalog KwikPen™

- 請問您使用的是哪一種胰島素 優泌樂筆混合型25 優泌樂筆混合型50 優泌樂筆
- 請問您覺得全新的優泌樂注射筆KwikPen好學嗎？ 非常同意 普通 非常不同意
- 重量輕且好握嗎？ 非常同意 普通 非常不同意
- 讓您覺得注射胰島素變得更簡單了嗎？ 非常同意 普通 非常不同意

注意：如果您沒有在每次注射前正確排空，您可能會注射過多或過少的胰島素。
執行排空及注射步驟時，請務必在有針頭的狀態下執行，以確保優泌樂筆的功能。

排空



轉動劑量旋鈕至2單位。
將注射筆朝上。
輕拍筆式小管卡匣套，
使空氣集中於頂端。



針頭朝上，按下劑量旋鈕直到停住並看到劑量顯示窗出現0。
按住劑量旋鈕並緩慢數到5。
胰島素呈直線自針頭尖端流出時，排空步驟即完成。
如果胰島素沒有呈直線流出，請重複排空步驟5~7最多四次。
注意：如果您沒有看到胰島素直線自針頭尖端流出，且優泌樂筆更難
設定劑量，請更換新的針頭並排空優泌樂筆。

注射




轉動劑量旋鈕至您需要注射的單位數量。如果設定過多單位，
您可以往回轉更正劑量。



使用醫療專業人員建議的注射技巧，將針頭插入皮膚。
拇指放在劑量旋鈕上，穩定按下直到劑量旋鈕停止移動。



按住劑量旋鈕不要放開緩慢數到5，直到檢查劑量顯示窗中的
數字為0，以確認投與完整的劑量。再從皮膚拔出針頭。
注意：檢查劑量顯示窗中的數字是否為0，以確認您
得到完整的劑量。

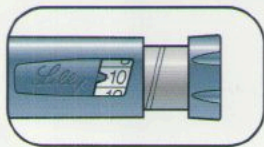

範例：10單位

注意：優泌樂筆不接受設定的劑量超過筆中剩餘的單位數量。

本衛教教材僅供專業醫護人員衛教病人使用 MKT-HB-12-002-Feb-17

Humalog[®] KwikPen[™]

● 您覺得全新的注射筆KwikPen 對您的血糖控制或生活品質可能帶來什麼幫助?