




1 基本構造名稱

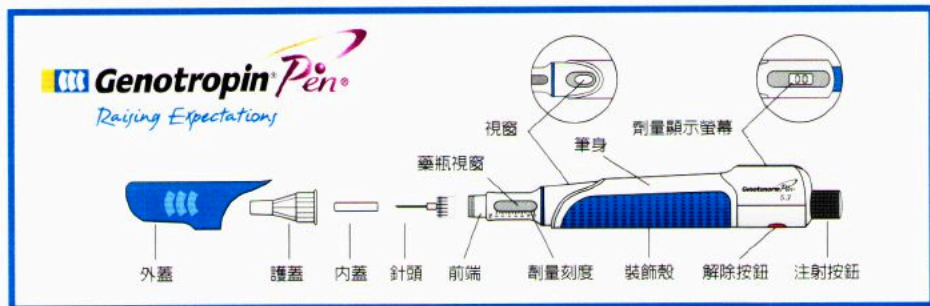

2 操作方法


A 更換藥瓶的步驟

1


將筆身倒退



壓下解除鈕

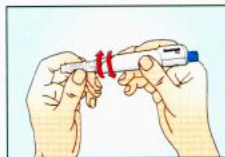


將筆前端金屬部份旋開，
取出空藥瓶

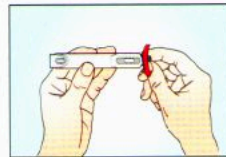


逆箭頭方向慢慢地轉，轉到
不能轉為止(共有53格)；
稍微往回轉至白線與灰線對
齊(聽見或感覺到「喀」一聲)

2


先裝針頭
再裝藥瓶

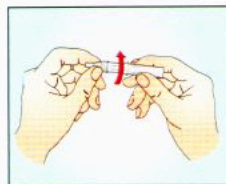

撕開針頭紙片，裝上新針頭
(此時勿將針頭護蓋打開)

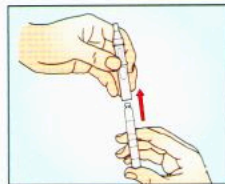


插上藥瓶(粉末端在上，
液體端在下)

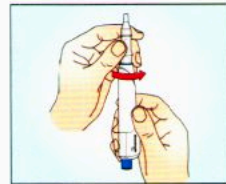


慢慢將筆身旋緊(避免氣泡產生)
(以上動作請保持針頭部位垂直朝上)

3

排氣

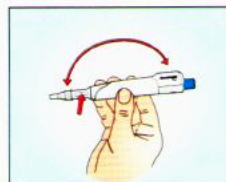

將筆身上下倒立數次，
以利粉末與液體混和
(請勿激烈搖晃)

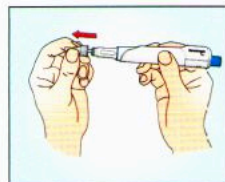

將針頭外，內護蓋取出




排氣：將注射按鈕慢慢用力
壓到底(聽到「喀」一聲)，
(為確保氣體排出，有藥液流出
屬正常狀況)



B 每日注射步驟

1 裝新針頭，調整劑量

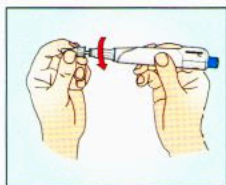


裝上新針頭



按下解鎖鈕(注射按鈕彈起，劑量顯示螢幕出現"00")




順前頭方向轉，調整注射劑量
注意！「螢幕」僅顯示目前要注射的劑量，不具記憶功能，且顯示數字在二分鐘後會自動消失，故在調整完劑量後請立即完成注射動作以免混淆。

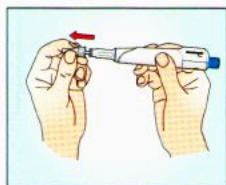


將針頭內外蓋取出準備施打


2 施打

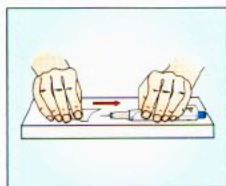


必要時，可套上伸縮套，避免看到針頭

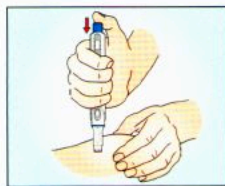

注射：
→選擇注射部位
→用酒精棉片擦拭消毒
→垂直插入針頭
→壓下注射按鈕直到「喀」一聲進入鎖住位置
→停留5-10秒後再拔出針頭

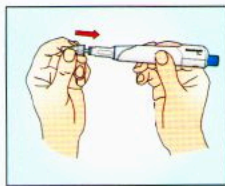

先套上護蓋再將針頭旋下

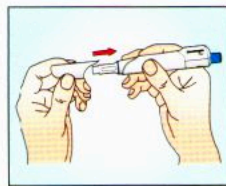

蓋上外蓋並置入盒中，放入冰箱(2-8°C)冷藏

Genotropin[®] Pen[®] 使用及保存小秘方

- 1 避免重摔、重壓，或與手機及其他電子用品長期放置一起，而影響數位式劑量調整器之準確度
- 2 自第一次使用開始，此筆之電池可維持2年
- 3 可選擇每一藥瓶用完的那一天，將藥瓶卸下後，將空筆放在室溫下乾燥，待第二天晚上裝上新藥瓶並施打後，再含藥瓶一起放入冷藏室(冰箱下層)保存
- 4 可利用筆前端之藥瓶視窗上的劑量刻度，檢測施打前後之劑量差別，及藥瓶所剩之藥量
- 5 經常以酒精棉或軟布擦拭，保持筆身各部份之清潔
- 6 詳細說明可參照筆盒內之說明書，若螢幕出現異常或其他問題，請與提供者聯絡更換



Pfizer Limited
輝瑞大藥廠股份有限公司

台北總公司
台北市251淡水鎮中正東路二段177號
TEL:(02)2809-7979 FAX:(02)2809-7676
www.pfizer.com.tw

台中辦事處
台中市408公益路二段51號10樓A室
TEL:(04)2328-2818 FAX:(04)2320-5438

高雄辦事處
高雄市802苓雅區四維三路6號16樓A室
TEL:(07)535-7979 FAX:(07)535-7676